

LONGEVILIFT

PRAKTINIS VADOVAS

DAUGIAFUNKCINĖS VEIDO
PROCEDŪROS
PRODUKTŲ DOSJĖ



Scan me!

[comfort zone]

conscious skin science

LONGEVILIFT

DAUGIAFUNKCINIŲ TECHNOLOGIJŲ ODAI APRAŠYMAS



PROCEDŪRŲ METU naudojamos 4 technologijos

AQUAPEEL su specialiomis rūgštinėmis valomosiomis priemonėmis, kurios dozuojamos per specialiai sukurtą aplikatorių (sterilizuojamą autoklave). Priemonė tepama nuolat ir tolygiai sukamaisiais judesiais, kartu su šepetėlio galvutės slydimu per odą sukuria švelnų, bet gilų išlyginamąjį ir detoksikuojamąjį poveikį.



Mažas rankinis instrumentas AQUAPEEL



Didelis rankinis instrumentas AQUAPEEL

VAKUMAS siurbiamasis veiksmas, kuris pašalina nešvarumus odoje, gerina mikrocirkuliaciją, oda yra geriau aprūpinama deguonimi ir greičiau atnaujinamos ląstelės, pašalinant susikaupusius toksinus odoje.

MESOPORACIJA taip pat žinomas kaip transderminis tiekimas, skatina veikliųjų medžiagų įsiskverbimą į odą.

MIKRO SROVĖ mažo intensyvumo impulsai (neviršijantys 1000 mikroamperų), stimuliuoja raumenų aktyvumą didindami raumenų ATP gamybą, atpalaiduojami susitraukę raumenys, o atsipalaidavę raumenys padidina elastingumą.

Procedūra atliekama 4 etapais ir taip pat tinkama jautriai odai.

1 ŽINGSNIS

AQUAPEEL technologija

DETOKSIKUOJA IR PAGERINA ODOS SPALVĄ

Vandens ir dinaminio šveitimo derinys atskleidžia odos grožį, suteikdamas spindesio ir tvirtumo. Rūgšties pagrindu pagamintų losjonų, skirtų konkreitiems odos poreikiams, naudojimas užtikrina pritaikytą veikimą, atitinkantį tikruosius odos poreikius.

- **INTENSYVUS LOSJONAS SU GLIKOLIO RŪGŠTIMI** atspariai, brandžiai odai.
- **VALOMASIS LOSJONAS SU MIGDOLO RŪGŠTIMI** nelygiai odai, linkusiai į riebalavimąsi ir bėrimus.
- **ŠVELNUS LOSJONAS SU GLUKONOLAKTONU** jaunai, jautriai odai.



2 ŽINGSNIS

VAKUMO technologija

GILUS VALYMAS

Vakumo pagalba pašalinamas sebumas bei pašalinami nešvarumai, giliai išvalo odą ir paruošia odą kitų priemonių ir medžiagų įsisavinimo etapui. Mechaninis siurbimo judesys suaktyvina kraujotaką ir padidina deguonies tiekimą. Skysčių ir nervinė dimensija.

1 ŽINGSNIS ir 2 ŽINGSNIS veikia kartu veikdamas ir skatindamas gilų valymą bei švelnų, bet visapusišką odos audinių šveitimą.

LONGEVILIFT

3 ŽINGSNIS

MESOPORACIJA technologija

GAIVINA

Ši fazė suteikia odai maistinių medžiagų, reikalingų stangrumui ir grožiui atgauti. Transderminis įvedimas leidžia giliai prasiskverbti aktyviems ingredientams tik tikslinėse srityse, įveikiant natūralų odos nepralaidumą. Tai „virtuali“ injekcija, kuri per odos barjerą gali pernešti veikliąsias medžiagas kur yra poreikis.

Jungiamasis matmuo

4 ŽINGSNIS

MIKRO SROVĖ technologija

TONIZUOJA

Dėl mažo intensyvumo mikrosrovių (MENS) padidėja raumenų energija ir pagerėja limfos kraujotaka, padidėja kolageno ir elastino gamyba. Iš naujo apibrėžiami veido kontūrai, išlyginamos laiko atsiradusios raukšlės, oda tonizuojama ir stangrinama.

Raumenų, nervų ir skysčio matmenys



SKIN TECH

PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

GEL

Masažinis gelis
CZ20791



pH 5.3 - 6.3

PAKUOTĖ
butelis su atlenkiamu
dangteliu
TALPA
300 ml

PRODUKTAS

Gelis turintis poliolio (cukraus alkoholio), užtikrina apsaugą ir hialurono rūgštis, padeda išlaikyti tinkamą odos drėkinimą atliekant procedūras su įrenginiais. Tinka veido ir kūno procedūroms. CONSCIOUS SKIN SCIENCE™ formulė, gamyba ir pakuotė su 96,9% natūralios kilmės ingredientais.

SAVYBĖS

Palengvina įrenginių, naudojančių radijo dažnį, ultragarsą ar mikro dažnių technologijas, antgalio slydimą, nepažeidžiant efektyvumo ir užtikrinant, kad kliento oda būtų apsaugota.

PRIVALUMAI

TINKAMAS ĮRANGAI SU ULTRAGARSU,
BI- AR DAUGIAPOLIU RADIODAŽNIU IR MIKRO
DAŽNIU
MALONI TEKSTŪRA, LENGVAI APLIKUOJAMA,
TINKA VEIDUI IR KŪNUI

KAIP VEIKIA

POLIOLIAI: alkoholiai, gauti iš cukraus, kurie sukuria barjerinį efektą, leidžiantį įrenginiui veikti.

HIALURONO RŪGŠTIS drėkinanti higroskopinė molekulė. Drėkina odą ir palaiko elastingumą bei odos švelnumą.

NURODYMAI

Įpilkite priemonės į indelį ir tepkite šepetėliu tik ant srities, kurią reikia apdoroti. Pradėkite procedūrą su aparatu, jei reikia, pakartokite priemonės užtepimą. Baigus, likučius pašalinkite sausu rankšluosčiu.

REKOMENDUOJAMA

Visiems odos tipams.

SKIN TECH PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

DELICATE SOLUTION valomasis losjonas su gliukonolaktonu CZ20801



PAKUOTĖ
butelis su atsukamu
dangteliu

TALPA
500 ml

PRODUKTAS

Veido losjonas, skirtas išskirtiniam naudojimui su [comfort zone] Longevilift aparatu. Skirtas plonai, jautriai ir jaunai odai be ypatingų trūkumų. Sinergijoje su aparato giluminio valymo veikimu, padeda paruošti veido odą tolimesniems procedūrų etapams. CONSCIOUS SKIN SCIENCE™ priemonė su 99,7% natūralios kilmės ingredientų, be gyvūninių produktų, silikonų, mineralinių aliejų, dirbtinių spalvų, etoksilatų (PEG) ir akrilatų, EDTA. Be pridėtinio kvapo.

SAVYBĖS

Vandeninis tirpalas, praturtintas gluconolactonu ir betainu, turtingas natūraliais drėkikliais, tokiais kaip glicerinas ir glikoliai, skatina gilų odos valymą ir užkerta kelią dehidratacijai. Sudėtyje yra 3,5-4,3 pH, kuri paruošia odą tolesniems procedūrų etapams ir yra stabilizuotas argininu, natūraliu amino rūgštingumu.

PRIVALUMAI

GILUS VALYMAS IR ŠVEITIMAS SU AQUAPEEL+VAKUMO ŽINGSNIU
DERMATOLOGISKAI IŠBANDYTA JAUTRIAI ODAI, IŠLAIKO
ODOJOS DRĖGMĘ
BE PRIDĖTINIŲ KVAPIJŲ MEDŽIAGŲ

KAIP VEIKIA

GLUKONOLAKTONAS 5%, polihidroksi rūgštis, kuri pasižymi progresyviu ir subtiliu švečiamuoju poveikiu. Ciklinė molekulinė struktūra užtikrina išskirtinę toleranciją.

BETAINAS - natūraliai žmogaus organizme randamas osmolitas, galintis surišti ir patraukti vandenį į ląsteles, išlaikant jų turį ir optimalią hidratacijos būseną.

NURODYMAI

Naudokite kartu su [comfort zone] Longevilift aparatu. Sekite protokole nurodytas instrukcijas.

REKOMENDACIJOS

Idealu plonai, jautriai ir jaunai odai, neturinčiai ypatingų trūkumų. Tik profesionaliam naudojimui.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Priemonė turi alfa-hidroksi rūgštį (AHA), kuri gali padidinti odos jautrumą, gali padidinti nudegimų riziką. Naudokite SPF apsaugos priemonę veido srityje ir ribokite saulės poveikį procedūrų metu ir vieną savaitę po.

Venkite kontakto su akimis ir sritimi aplink akis. Nenaudokite ant sudirgintos odos.

SKIN TECH PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

INTENSIVE SOLUTION valomasis losjonas su glikolio rūgštimi CZ20803



PAKUOTĖ
butelis su atsukamu
dangteliu

TALPA
500 ml

PRODUKTAS

Veido losjonas, sukurtas išskirtiniam naudojimui su [comfort zone] Longevilift aparatu, sukurtas storai, pavargusiai odai su matomomis raukšlėmis. Longevilift sinergijoje su giliai valomoju losjonu paruošia odą tolimesniems procedūros etapams. CONSCIOUS SKIN SCIENCE™ priemonė su 98,9% natūralios kilmės ingredientų, be gyvūninių kilmės medžiagų, silikonų, mineralinių aliejų, dirbtinių spalvų, etoksilatų (PEG) ir akrilatų, EDTA. Be pridėtų kvapiųjų medžiagų.

SAVYBĖS

Vandeninis tirpalas, praturtintas glikolio rūgštimi ir betainu, turtingas natūraliais drėkikliais, tokiais kaip glicerinas ir glikoliai, kurie skatina gilų odos valymą, tuo pačiu užkertant kelią dehidratacijai. Sudėtyje yra rūgštis pH 3,5-4,3, kuri paruošia odą tolesniems procedūros etapams ir yra stabilizuotas argininu, natūraliu amino rūgštimi.

PRIVALUMAI

GILUS VALYMAS IR ŠVEITIMAS KARTU SU AQUAPEEL IR VAKUMU
SUKURTAS STORAI, PAVARGUSIAI ODAI, IŠLAIKO DRĖGMĘ ODOJE
BE PRIDĖTŲ KVAPIJŲ MEDŽIAGŲ

KAIP VEIKIA

GLIKOLIO RŪGŠTIS 1%, alfa-hidroksi rūgštis, kuri intensyviai skatina ląstelių atsinaujinimą. Išskirtinai maža molekulinė struktūra užtikrina gilų odos atnaujinimą ir padeda mažinti amžėjimo poveikį. **BETAINAS**, osmolitas, natūraliai randamas žmogaus organizme, galintis prisijungti ir įtraukti vandenį į ląsteles, išlaikydamas tūrį ir optimalų drėkinimo lygį.

NURODYMAI

Naudokite kartu su [comfort zone] Longevilift aparatu. Sekite protokole nurodytas instrukcijas.

REKOMENDACIJOS

Idealu storai, pavargusiai odai su matomomis raukšlėmis.
Tik profesionaliam naudojimui.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Venkite kontakto su akimis ir sritimi aplink akis.
Nenaudokite ant sudirgintos odos.

SKIN TECH PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

PERFECTING SOLUTION valomasis losjonas su migdolų rūgštimi CZ20802



PAKUOTĖ
butelis su atsukamu
dangteliu

TALPA
500 ml

PRODUKTAS

Veido losjonas, sukurtas išskirtiniam naudojimui su [comfort zone] Longevilift aparatu, mišriai ir užterštai veido odai, turinčiai pigmentines dėmes. Longevilift sinergijoje su giliai valomuoju losjonu paruošia odą tolimesniems procedūros etapams. CONSCIOUS SKIN SCIENCE™ su 96,7% natūralios kilmės ingredientų, be gyvūninių kilmės medžiagų, silikonų, mineralinių aliejų, dirbtinių spalvų, etoksilatų (PEG) ir akrilatų, EDTA. Be pridėtų kvapiųjų medžiagų.

SAVYBĖS

Vandeninis tirpalas, praturtintas migdolo rūgštimi ir gintaro rūgštimi, turtingas natūraliais drėkikliais, tokiais kaip glicerinas ir glikoliai, skatina gilų valymą, tuo pačiu užkertant kelią dehidratacijai. Sudėtyje yra rūgštis pH 3,5-4,3 kuri paruošia odą tolesniems procedūros etapams ir yra stabilizuotas argininu, natūraliu aminorūgštimi.

PRIVALUMAI

GILUS VALYMAS IR ŠVEITIMAS KARTU SU AQUAPEEL IR VAKUMU
TIKSLINĖ RŪGŠČIŲ KOMBINACIJA ODOS TRŪKUMAMS IR DISCHROMIJAI
IŠLAIKO DRĖGMĘ ODOJE
BE PRIDĖTINIŲ KVAPIJŲ MEDŽIAGŲ

KAIP VEIKIA

MIGDOLINĖ RŪGŠTIS 3%, alfa-hidroksi rūgštis su šveičiamosiomis savybėmis, padedanti su hiperkeratoze, kurią sukelia perteklius oksiduoto sebumo plaukų folikuluose. Padeda sumažinti trūkumus ir išlaikyti odą lygią.
GINTARO RŪGŠTIS 1,3%, daugiavandinė alfa-hidroksi rūgštis, sujungia šveičiamąsias savybes su antibakteriniu poveikiu.

NURODYMAI

Naudokite kartu su [comfort zone] Longevilift aparatu. Sekite protokole nurodytas instrukcijas.

REKOMENDACIJOS

Idealu mišriai ir užterštai odai su pigmentinėmis dėmėmis.
Tik profesionaliam naudojimui.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Priemonė turi alfa-hidroksi rūgštį (AHA), kuri gali padidinti odos jautrumą, gali padidinti nudegimų riziką. Naudokite SPF apsaugos priemonę veido srityje ir ribokite saulės poveikį procedūros metu ir vieną savaitę po jo. Venkite kontakto su akimis ir sritimi aplink akis. Nenaudokite ant sudirgintos odos.

Certified



Corporation

[comfort zone]

conscious skin science



SUGIHARA
PRO

- Vilniaus m.: +370 612 28906
- Vilniaus raj., Alytaus / Utenos reg.: +370 682 07022
- Kauno reg.: +370 611 34315
- Klaipėdos reg.: +370 610 30543
- Šiaulių / Panevėžio reg. 8 614 55116
- NAUJIEMS KLIENTAMS Vilniaus / Kauno reg.: +370 618 22917

UAB Sugihara PRO Metalo g. 13a,
Vilnius www.sugiharapro.lt
Tel.: 8 800 24 444, (8 5) 270 57 12
El. paštas: info@sugiharapro.lt